

ORTOPEDIA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



CONTACTO



+52 (443) 3159525



subgerencia.comercial@grupomedicomorvi.com



www.grupomedicomorvi.com



Zona Inferior

(pie, pantorrilla, rodilla y muslo)



Pag. 3 - 20

Zona Media

(cadera/pelvis, abdomen, pecho y espalda)



Pag. 21- 29



Zona Superior

(hombro, codo, mano y cabeza)



Pag. 30 - 35



ZONA INFERIOR



Soporte para Muslo ajustable

Función: Para contracturas de isquiotibiales, lesión de cuádriceps, músculos adoloridos, distensión de la ingle, dolor de muslo y frecuente hinchazón.

Talla: Universal

Se ajusta a la mayoría de los tamaños de muslo

BENEFICIOS



CONOCE MÁS

Instrucciones de uso

- 1.- Abra el soporte para muslo desabrochando los velcros.
- 2.- Envuelva su muslo y haga que el logo mire hacia adelante y esté en la parte superior.
- 3.- Abroche las dos correas firmemente para garantizar la comodidad y compresión.



ZONA INFERIOR



Anillo subrotuliano

Función: Ideal para Tendinitis rotuliana, condromalacia, rastreo rotuliano y enfermedad de Osgood-Schlatter. Su suaves materiales lo hacen muy confortable y fácil de colocar en el tendón debido a su forma y materiales.

Talla: Universal

BENEFICIOS



Fácil uso



Ajustable



Cómodo



Muy acojinado



Talla universal

Instrucciones de uso

Coloque el anillo subrotuliano sobre el tendón debajo de la rótula, ajuste y cierre por medio del velcro.



CONOCE MÁS

Los velcros no se deben mojar.

Limpiar únicamente en caso que sea realmente necesario con un trapo ligeramente húmedo, con jabón suave y agua a temperatura ambiente. Secar a la sombra. No se debe utilizar lavadora, secadora, blanqueador ni dejar al sol.

ZONA INFERIOR



Rodillera elástica deportiva premium

Función: Proporciona compresión, soporte a la articulación y al músculo de la rodilla. Para dolor en las articulaciones, desgarro de menisco, artritis, distensión e hinchazón.

Talla: Chica, mediana y grande.

BENEFICIOS



CONOCE MÁS

- 1.- Introduzca la rodillera en su pierna.
- 2.- Centre la rodillera en su rótula.
- 3.- Alise cualquier arruga de la rodillera.

Instrucciones de lavado.

Limpiar únicamente en caso que sea realmente necesario con un trapo ligeramente húmedo, con jabón suave y agua a temperatura ambiente. Secar a la sombra. No se debe utilizar lavadora, secadora, blanqueador ni dejar al sol.



ZONA INFERIOR

Rodillera corta

Función: Alivia el dolor moderado de torceduras y esguinces; dolor de rodilla, artritis y tendinitis. Ayuda a retener el calor corporal, proporciona compresión y calor terapéutico. El diseño abierto sobre la rótula ayuda a aliviar la presión. El estabilizador de rótula ayuda a generar mayor protección y estabilidad, previniendo así el desplazamiento. Así mismo, los soportes laterales flexibles ayudan a darle mayor soporte a la rodilla.



Talla: Universal y Extra Grande.

BENEFICIOS

- ✓ Soportes laterales flexibles
- ✓ Estabilizador de rótula
- ✓ Retiene el calor corporal
- ✓ Aumenta la circulación sanguínea
- ✓ Cómodo
- ✓ Alivia el dolor
- ✓ Alivia la presión

Rodillera larga



Alivia el dolor moderado de torceduras y esguinces; dolor de rodilla, artritis y tendinitis. Ayuda a retener el calor corporal, proporciona compresión y calor terapéutico. El diseño abierto sobre la rótula ayuda a aliviar la presión. El estabilizador de rótula ayuda a generar mayor protección y estabilidad, previniendo así el desplazamiento. Así mismo, los soportes laterales flexibles ayudan a darle mayor soporte a la rodilla.

Talla: Universal.

ZONA INFERIOR

Rodillera ajustable con doble soporte lateral flexible

Función: Para dolor de rodilla, lesiones de ACL (ligamento cruzado anterior) / PCL (ligamento cruzado posterior), soporte de rótula y esguinces.

- Doble soporte lateral flexible.
- Correas de compresión ajustable.
- De manga para mejor ergonomía.
- Muy cómoda.

Talla: Chica, mediana y grande.

BENEFICIOS



Ergonómica



Correas de compresión



Cómodo



Soportes laterales flexibles



Excelente compresión



CONOCE MÁS

- 1.- Desabroche las correas de velcro.
- 2.- Coloque el soporte sobre su rodilla.
- 3.- Centre el orificio abierto en la rótula.
- 4.- Ajuste las correas superior e inferior por medio del velcro.

Los velcros no se deben mojar

Limpiar únicamente en caso que sea realmente necesario con un trapo ligeramente húmedo, con jabón suave y agua a temperatura ambiente. Secar a la sombra. No se debe utilizar lavadora, secadora, blanqueador ni dejar al sol.



ZONA INFERIOR



Rodillera premium abierta con estabilizador de rótula y doble soporte lateral flexible

- **Función:** Previene eficazmente el desgarramiento, tensión y esguince de menisco. Para tendinitis, dolor y artritis de rodilla, también alivia el ligamento cruzado anterior (ACL), ligamento colateral lateral (LCL) y ligamento colateral medial (MCL).

Talla: Universal

BENEFICIOS



Soportes laterales flexibles



Estabilizador de rótula



Cómodo



Calidad premium



Excelente compresión

CONOCE MÁS

- 1.- Desabroche las correas de velcro.
- 2.- Coloque el soporte sobre su rodilla.
- 3.- Centre el orificio abierto en la rótula.
- 4.- Ajuste las correas superior e inferior por medio del velcro.

Los velcros no se deben mojar

Limpiar únicamente en caso que sea realmente necesario con un trapo ligeramente húmedo, con jabón suave y agua a temperatura ambiente. Secar a la sombra. No se debe utilizar lavadora, secadora, blanqueador ni dejar al sol.



ZONA INFERIOR

Rodillera mecánica

- **Función:** trata y alivia el dolor asociado con al desalineación patelofemoral, condromalacia y tendinitis, además de inestabilidades mediales, laterales y meniscectomía operatorias.

Talla: Chica, mediana, grande y extra grande.

BENEFICIOS



INSTRUCCIONES DE USO

1. Desabroche las dos correas y cierres frontales de velcro de la rodillera, el lado más amplio será el lado superior y el más angosto el inferior.
2. Ajuste correas y cierres de velcro frontales centrado la rótula en el espacio libre central de la rodillera.

NO SUMERGIR EN AGUA

Los velcros no se deben mojar

Retire las varillas metálicas antes de limpiar. Limpiar con un trapo ligeramente húmedo, con jabón suave y agua a temperatura ambiente. Secar a la sombra.

No se debe utilizar lavadora, secadora, blanqueador ni dejar al sol.



ZONA INFERIOR

Rodillera inmovilizadora TRI-Panel

Función: Permite una completa inmovilización de la rodilla extendida, generando un soporte medio-lateral. Es ajustable para los diferentes tamaños de las piernas en el proceso del curso del tratamiento del paciente.

Talla: Universal

BENEFICIOS



INSTRUCCIONES DE USO

1. Extender la pierna y tener la rodilla completamente extendida, para adecuar al tamaño de la circunferencia de la pierna puede remover la parte frontal de la rodillera inmovilizadora Tri-Panel que está sujeta en dos partes por medio de velcros y ajustar a su medida.
2. Al colocarla, ajuste la tensión de los velcros frontales para inmovilizar, pero sin que se genere alguna incomodidad al paciente.
3. La Rodillera inmovilizadora Tri-Panel está diseñada sólo para utilizarse una vez durante el proceso de la rehabilitación, no podrá ser reutilizada en futuras ocasiones.

MEDIDAS

Tamaño de Rodillera inmovilizadora Tri-Panel	40cm (16" pulgadas)	48cm (19" pulgadas)	56cm (23" pulgadas)
Altura del Paciente	1.50 a 1.65 mts.	1.65 a 1.80 mts.	1.80 mts. o más

Los velcros no se deben mojar

Las varillas de aluminio no se pueden quitar y no se debe lavar el producto por completo, únicamente en caso que sea realmente necesario, limpiar con un trapo ligeramente húmedo.

se recomienda acompañar con muletas para soporte del paciente

ZONA INFERIOR

Rodillera post-operatoria graduable



Función: Diseñada para inestabilidad media/lateral, incluida la laxitud del ligamento cruzado anterior (ACL) y ligamento cruzado posterior (PCL), usada como post-operatoria y de rehabilitación. Las bisagras de control de movimiento de doble eje con almohadillas de espuma proporcionan un rango de movimiento completo y limitado con posiciones de flexión / extensión de 0 ° a 90 °. Esto con un diseño ligero, rígido y cómodo.

Talla: Universal y Largo ajustable

BENEFICIOS



INSTRUCCIONES DE USO

Para ajustar el largo:

Presione de ambos lados el botón de ajuste de longitud, recorra y libere a la longitud deseada para ser «bloqueada» esa posición. Hay que realizar esto en la parte superior y en la inferior. Recuerde que ambos lados deben tener la misma longitud de ajuste.

Para fijar la bisagra de Flexión y Extensión:

Presione hacia arriba el botón colocándolo en la posición «bloquear», ajuste la posición de flexión y extensión en la posición indicada en ambos lados y vuelva a bajar el botón a “bloqueo” para ser fijada. Verifique que ambos lados hayan quedado ajustados de la misma manera.

ZONA INFERIOR

Soporte para pantorrilla ajustable



Función: Ayuda a la hinchazón, edemas, calambres, venas varicosas y espinillas lesionadas. Protege la pantorrilla de la tensión muscular y proporciona un buen soporte para aliviar el dolor en las piernas.

Talla: Universal y Largo ajustable

BENEFICIOS



INSTRUCCIONES DE USO

Para ajustar el largo:

Presione de ambos lados el botón de ajuste de longitud, recorra y libere a la longitud deseada para ser «bloqueada» esa posición. Hay que realizar esto en la parte superior y en la inferior. Recuerde que ambos lados deben tener la misma longitud de ajuste.

Para fijar la bisagra de Flexión y Extensión:

Presione hacia arriba el botón colocándolo en la posición «bloquear», ajuste la posición de flexión y extensión en la posición indicada en ambos lados y vuelva a bajar el botón a “bloqueo” para ser fijada. Verifique que ambos lados hayan quedado ajustados de la misma manera.

ZONA INFERIOR

Férula para tobillo de gel



Función: Adecuado para usar desde las fases aguda a activa de la recuperación y rehabilitación del tobillo. Terapia de frío para tratar los tobillos inflamados e incluso la distribución de la presión.

La fuerte carcasa exterior de plástico se amolda a los contornos y ergonomía de su tobillo y proporciona un soporte cómodo.

La superficie interna de gel proporciona el soporte y la compresión ideal para aliviar el dolor, además de poder usarlo para terapia de frío.

Talla: Chica, mediana y grande.

BENEFICIOS



INSTRUCCIONES DE USO

Abra/desajuste la correa lateral de velcro del talón e ingrese su pie y ajuste la correa a su comodidad validando que estén centradas a la parte baja de la pierna y dimensión del área. Ajuste la correa de velcro más baja de la pierna alrededor de la férula, luego ajuste la correa de velcro superior de la misma forma, al terminar valide que la correa inferior de la pierna haya quedado bien ajustada.

Para terapia de frío: remueva las almohadillas terapéuticas de gel separándolas del velcro que las une a la férula. Meta al congelador únicamente las almohadillas terapéuticas por dos horas. NO SE DEBE METER la férula completa al congelador. Vuelva a colocarlas en la férula y aplique.

Para terapia de calor: remueva las almohadillas terapéuticas de gel separándolas del velcro que las une a la férula. En un recipiente, caliente agua a hervir en la estufa e introduzca únicamente las almohadillas terapéuticas por un período de 3 a 5 minutos máximo. Antes de ponérsela directo, tóquelas con precaución a criterio para asegurar tolerarlas sin sufrir daño de quemadura. No se recomienda calentar en microondas.

ZONA INFERIOR

Bota neumática walker baja




Función: Bota inmovilizadora de tobillo, su función es reemplazar al enyesado de una manera más cómoda y confortable a través de un sistema de doble celda de aire, medial y lateral, que infla ambos lados y se ajusta fácilmente con una bomba al frente.

Recomendada cuando la fractura sea estable o después del retirado del enyesado. Diseñadas para mantener una compresión e inmovilización adecuada a través del proceso de saneamiento.

Talla: Extra chica, chica, mediana, grande y extra grande.

BENEFICIOS

- Tela Interior Transpirable para una mayor comodidad.
- Cámara más amplia del mercado.
- Velcro vertical en parte interior para un mejor ajuste.

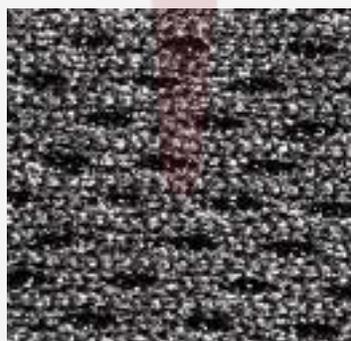

Talla Bota Walker	Largo máximo del pie (cm)	Tallas MEX Hombre & Mujer
Extra Chica	22	0 - 2 / 20 - 22
Chica	24	2.5 - 4 / 22.5 - 24
Mediana	27	4.5 - 7 / 24.5 - 27
Grande	29	7.5 - 9 / 27.5 - 29
Extra Grande	30.5	9.5 - 10.5 / 29.5 - 30.5

Forma de obtener largo del pie para tabla

Medway

INSTRUCCIONES DE USO

Desabroche las correas de velcro, coloque el pie y vuelva a ajustar los velcros.

Asegurarse que la válvula esté bien cerrada y bombee para inflar la cámara de aire a modo que sea cómodo y suave.

ZONA INFERIOR

Bota neumática walker alta




Función: Bota inmovilizadora de tobillo, su función es reemplazar al enyesado de una manera más cómoda y confortable a través de un sistema de doble celda de aire, medial y lateral, que infla ambos lados y se ajusta fácilmente con una bomba al frente.

Recomendada cuando la fractura sea estable o después del retiro del enyesado. Diseñadas para mantener una compresión e inmovilización adecuada a través del proceso de saneamiento.

Talla: Extra chica, chica, mediana, grande y extra grande.

BENEFICIOS

- Tela Interior Transpirable para una mayor comodidad.
- Cámara más amplia del mercado.
- Velcro vertical en parte interior para un mejor ajuste.

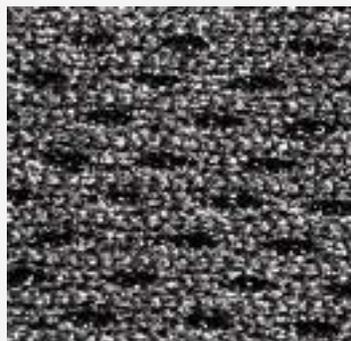

Talla Bota Walker	Largo máximo del pie (cm)	Tallas MEX Hombre & Mujer
Extra Chica	22	0 - 2 / 20 - 22
Chica	24	2.5 - 4 / 22.5 - 24
Mediana	27	4.5 - 7 / 24.5 - 27
Grande	29	7.5 - 9 / 27.5 - 29
Extra Grande	30.5	9.5 - 10.5 / 29.5 - 30.5

Forma de obtener largo del pie para tabla

Medway

INSTRUCCIONES DE USO

Desabroche las correas de velcro, coloque el pie y vuelva a ajustar los velcros.

Asegurarse que la válvula esté bien cerrada y bombee para inflar la cámara de aire a modo que sea cómodo y suave.

ZONA INFERIOR

Zapato volado de antepié



Función: Diseño enfocado en darle protección y reducción de presión a la zona del antepié. Al ser cuadrado en la parte frontal, ayuda a darle una mayor protección y seguridad de los dedos.

Uso recomendado para cirugías, traumas o heridas.

Talla: Extra chica, chica, mediana, grande y extra grande.



GUÍA DE TALLAS



Forma de obtener
largo del pie para tabla

Talla Zapato Volado del Antepié	Largo máximo del pie (cm)	Tallas MEX Hombre & Mujer
Extra Chica	21.5	0 - 1.5 / 20 - 21.5
Chica	23.5	2 - 3.5 / 22 - 23.5
Mediano	25	4 - 5 / 24 - 25
Grande	27	5.5 - 7 / 25.5 - 27
Extra Grande	29	7.5 - 9 / 27.5 - 29

Medway



ZONA INFERIOR

Zapato volado de talón

Función: Diseño enfocado en darle protección y reducción de presión a la zona del antepié. Al ser cuadrado en la parte frontal, ayuda a darle una mayor protección y seguridad de los dedos.

Uso recomendado para cirugías, traumas o heridas.

Talla: Extra chica, chica, mediana, grande y extra grande.



- Se adapta al pie izquierdo o derecho, de fácil uso.
- Acojinado y suave en puntos clave para generar confort.



CM

Talla Zapato Volado del Talón	Largo máximo del pie (cm)	Tallas MEX Hombre & Mujer
Extra Chico	21.3	0 – 1.5 / 20 – 21.5
Chico	23.3	1.5 – 3.5 / 21.5 – 23.5
Mediano	25.3	3.5 – 5.5 / 23.5 – 25.5
Grande	27.3	5.5 – 7.5 / 25.5 – 27.5
Extra Grande	29.2	7.5 – 9.5 / 27.5 – 29.5

Forma de obtener largo del pie para talle

Medway



ZONA INFERIOR

Zapato post-operatorio (punta redonda)

Función: Diseñado para brindar una mayor protección y comodidad después de procedimientos post-operatorios como cirugías de pie y lesiones por traumatismos (golpes). La suela rígida evita el movimiento excesivo del pie para un mejor cuidado después de la cirugía. Ayuda para una mejor curación y rehabilitación post-operatoria.



Talla Zapato Post-Operatorio (punta redonda)	Largo máximo del pie (cm)	Tallas MEX Hombre & Mujer
Extra Chico	23	1.5 – 3 / 21.5 – 23
Chico	24.4	3 – 4.5 / 23 – 24.5
Mediano	26.2	4.5 – 6 / 24.5 – 26
Grande	27.6	6 – 7.5 / 26 – 27.5
Extra Grande	29.5	7.5 – 9.5 / 27.5 – 29.5

Talla: Extra chico, chico, mediana, grande y extra grande.

Zapato post-operatorio (punta cuadrada)

Función: Diseñado para brindar una mayor protección y comodidad después de procedimientos post-operatorios como cirugías de pie y lesiones por traumatismos (golpes). La suela rígida evita el movimiento excesivo del pie para un mejor cuidado después de la cirugía. Ayuda para una mejor curación y rehabilitación post-operatoria.



Talla Zapato Post-Operatorio (punta cuadrada)	Largo máximo del pie (cm)	Tallas MEX Hombre & Mujer
Extra Chico	22.6	1 – 2.5 / 21 – 22.5
Chico	24.1	2.5 – 4 / 22.5 – 24
Mediano	25.7	4 – 5.5 / 24 – 25.5
Grande	26.9	5.5 – 7 / 25.5 – 27
Extra Grande	28.8	7 – 8.5 / 27 – 28.5

Talla: Extra chico, chico, mediana, grande y extra grande.

ZONA INFERIOR

TOBILLERAS ELÁSTICAS



TOBILLERA ELÁSTICA

Talla: Chica-Mediana y Mediana-Grande



TOBILLERA ELÁSTICA EN BANDA

Talla: Universal, ajustable



TOBILLERA ELÁSTICA DEPORTIVA PREMIUM

Talla: Chica, Mediana y Grande  **alta calidad**



TOBILLERA AJUSTABLE

Talla: Universal, ajustable.

BENEFICIOS

-  Estabiliza y alivia el dolor
-  Ligera y duradera
-  Transpirable
-  Elástica

ZONA INFERIOR

Soporte para arco del pie

Función: Para fascitis plantar, dolor de talón y dolor de pie.



Para fascitis plantar.
Transpirable.
Fácil de usar.
Muy cómodo.

**INCLUYE
2 PIEZAS**

Talla: Universal, Se ajusta a la mayoría de los tamaños de pies



ZONA MEDIA

Corrector de Postura elástico transpirable

Función: Corrector de espalda y postura. Ayuda a corregir la mala postura, la posición de la espalda al usar la computadora, cifoescoliosis, inestabilidad del hombro, lesiones deportivas y otros problemas de espalda relacionados.

Talla: Chica, mediana y grande.

BENEFICIOS



INSTRUCCIONES

- 1.- Desabroche todas las correas de velcro que puedan estar adheridas entre sí.
- 2.- Dé la vuelta a la almohadilla de malla en la parte posterior y haga una figura 8.
- 3.- Los brazos pasan a través de las correas de los hombros como si se usara un chaleco.
- 4.- Jale de las dos correas de los hombros hasta su comodidad.
- 5.- A continuación, fíjelos en cruz en la banda ancha de la cintura con velcro.



Los velcros no se deben mojar

Instrucciones de lavado.

Limpiar únicamente en caso que sea realmente necesario con un trapo ligeramente húmedo, con jabón suave y agua a temperatura ambiente. Secar a la sombra. No se debe utilizar lavadora, secadora, blanqueador ni dejar al sol.

ZONA MEDIA

Soporte de Pecho

Función: El soporte para pecho se aplica en la región torácica para comprimir y envolver la caja torácica y ofrecer una fijación del esternón a la vez que permite una flexibilidad suficiente para una respiración cómoda.

Los velcros no se deben mojar

BENEFICIOS



GUÍA DE TALLAS

Chica	80cm - 92.50cm
Mediana	92.50cm - 105cm
Grande	105cm - 117.50cm
Extra Grande	117.50cm - 130cm



Usos:

- Para estabilización en fracturas del esternón.
- Uso posterior a cirugía cardiotorácica.
- Protege y une las incisiones quirúrgicas en el pecho.
- Facilita el proceso de expulsión de las flemas de los pulmones después de la cirugía.
- Almohadilla anatómica.
- Compresión controlada.

ZONA MEDIA

Cinturón para costilla femenino

Función: Proporciona un soporte óptimo para la caja torácica, ayuda a curar y proteger las costillas fracturadas, dislocadas, rotas o agrietadas. Para apoyo post-operatorio e inmovilización del área del pecho después de cirugía a corazón abierto o torácica, esternotomía, fracturas de esternón y fracturas de costillas.

Los velcros no se deben mojar

BENEFICIOS



Talla: Chica, mediana y grande.



Características:

- Cuenta con elástico duradero.
- Varillas flexibles para soporte de espalda.
- Material transpirable.
- Muy cómodo para uso diario.
- Fácil de usar.



ZONA MEDIA

Cinturón para costilla femenino

Función: Proporciona un soporte óptimo para la caja torácica, ayuda a curar y proteger las costillas fracturadas, dislocadas, rotas o agrietadas. Para apoyo post-operatorio e inmovilización del área del pecho después de cirugía a corazón abierto o torácica, esternotomía, fracturas de esternón y fracturas de costillas.

Los velcros no se deben mojar

BENEFICIOS



Talla: Chica, mediana y grande.



Instrucciones de lavado

Limpiar únicamente en caso que sea realmente necesario con un trapo ligeramente húmedo, con jabón suave y agua a temperatura ambiente. Secar a la sombra.


No se debe utilizar lavadora, secadora, blanqueador ni dejar al sol.

ZONA MEDIA

Faja Industrial

Función: Genera un mayor soporte y protección a la espalda para el levantamiento de objetos de peso considerable, también usado como cinturón de protección para el dolor lumbar.

- Tirantes removibles por medio de velcros.
- Correas de tensión de doble tracción.
- 6 varillas de soporte.

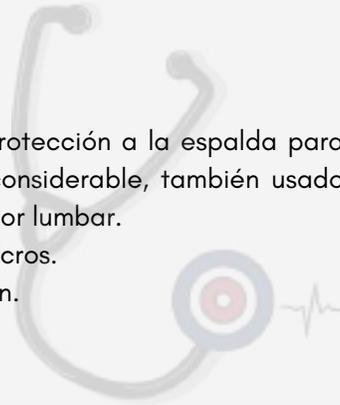

BENEFICIOS



Talla	Rango de circunferencia de cintura en cm
Chica	86 cm - 98 cm
Mediana	98 cm - 110 cm
Grande	110 cm - 122 cm

Los velcros no se deben mojar

Limpiar únicamente en caso que sea realmente necesario con un trapo ligeramente húmedo, con jabón suave y agua a temperatura ambiente.



ZONA MEDIA

Faja sacrolumbar flexible

Función: Ayuda a disminuir el dolor de espalda en la región sacrolumbar causado por esguinces, dolor muscular y torceduras. Gracias a su compresión, ayuda a estabilizar la región abdominal y sacrolumbar generando un mayor alivio.

- 6 varillas de soporte.
- Ajuste con doble correa.
- Su diseño ayuda a tener comodidad en las actividades diarias.

BENEFICIOS



Tabla de tallas:

Circunferencia de cintura.

Chica	75 - 85 cm
Mediana	90 - 100 cm
Grande	100 - 110 cm
Extra Grande	110 - 120 cm

Los velcros no se deben mojar

Limpiar únicamente en caso que sea realmente necesario con un trapo ligeramente húmedo, con jabón suave y agua a temperatura ambiente.



ZONA MEDIA

Faja sacrolumbar flexible transpirable

Función: Ayuda a disminuir el dolor de espalda en la región sacrolumbar causado por esguinces, dolor muscular y distensiones. Gracias a su compresión, ayuda a estabilizar la región abdominal y sacrolumbar generando un mayor alivio.

- Ultra transpirable y elástica.
- 6 varillas de soporte flexible.
- Ajuste con doble correa.

BENEFICIOS



Tabla de tallas:

Circunferencia de cintura.

Chica	75 - 85 cm
Mediana	90 - 100 cm
Grande	100 - 110 cm
Extra Grande	110 - 120 cm

Los velcros no se deben mojar

Limpiar únicamente en caso que sea realmente necesario con un trapo ligeramente húmedo, con jabón suave y agua a temperatura ambiente.




ZONA MEDIA

Soporte atlético suspensorio

Función: Para hombres, alivia la tensión sobre el área escrotal, recomendado después de la cirugía de hernia.

- Mantiene la entrepierna cómoda.
- Material transpirable.
- Fácil uso.

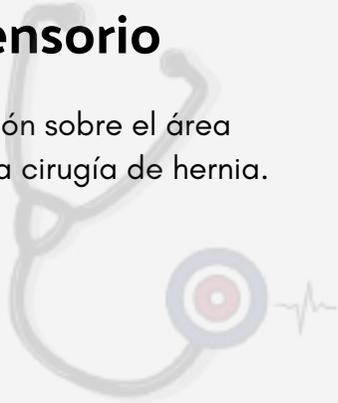

BENEFICIOS




Talla	Rango de circunferencia de cintura en cm
Chico	80 cm - 90cm
Mediano	90 cm - 100 cm
Grande	100 cm - 110 cm

Instrucciones de lavado

Lavar a mano con jabón suave y agua a temperatura ambiente y dejar secar a la sombra. No se debe utilizar lavadora, secadora, blanqueador, plancha, ni dejar al sol.

Talla: Chica, mediana y grande.

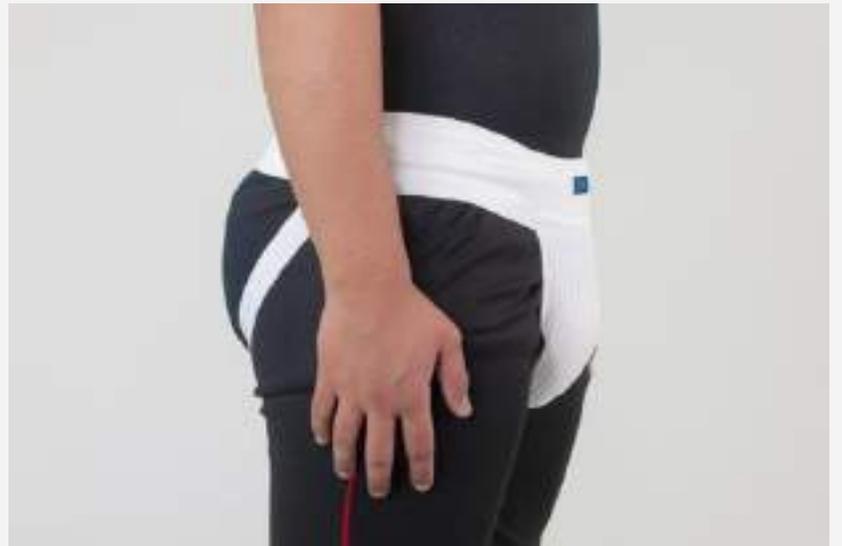



FAJA ABDOMINAL

Talla: Universal, Altura: corta 23 cm y larga 31 cm, se ajusta a la mayoría de los tamaños.



FAJA ABDOMINAL POST-PARTO

Talla: Universal, Altura: 31 cm, se ajusta a la mayoría de los tamaños de cintura-cadera.



FAJA PARA COLOSTOMÍA

Talla: Chica, mediana y grande.



FAJA DEPORTIVA

Talla: Universal, Altura: 23 cm, se ajusta a la mayoría de los tamaños de cintura.

ZONA SUPERIOR



Soporte para codo post-operatorio graduable telescópico

Función: Para aplicaciones no quirúrgicas, esguinces y roturas de ligamentos colaterales y transposición del nervio cubital. Puede usarse después de la extracción temprana del yeso para estabilizar fracturas y para inmovilización post-operatoria.

Las bisagras de aluminio con rango de movimiento permiten el ajuste de flexión y extensión para proporcionar un rango de movimiento protegido y controlado en los procedimientos de rehabilitación.

La correa ajustable que se coloca en el cuello hacia el soporte, ayuda a dar una inmovilización adicional y coloca al brazo en una posición deseada con descanso.

BENEFICIOS



Ventilación



Fácil ajuste



Precisión



Confortable



Ajuste de Longitud


Talla: Universal, lado izquierdo.

Talla: Universal, lado derecho.

CONOCE MÁS



ZONA SUPERIOR

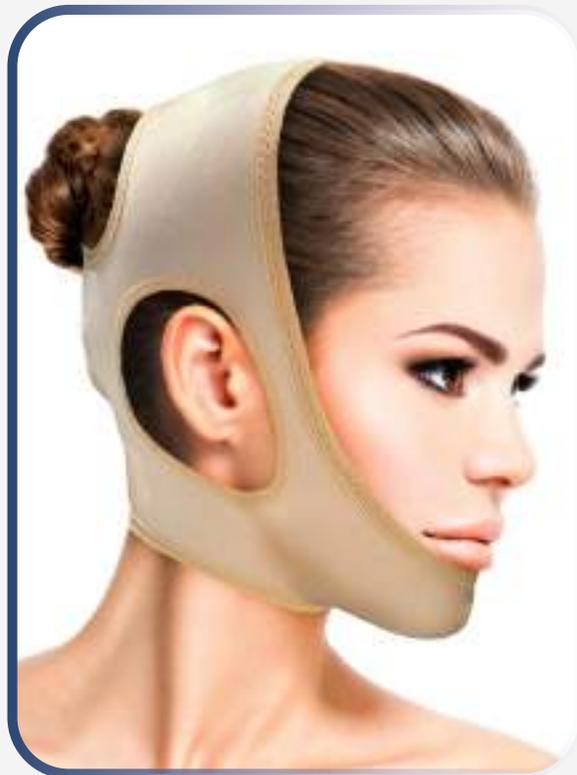

Mentonera

Función: Para uso en estiramiento facial, cirugía facial, implante de mentón, mentoplastia, cirugía de cuello y cirugía oral o maxilofacial.

- Alta calidad en tela de compresión sin molestias.
- Levanta barbilla y estira el rostro.
- Muy cómoda.
- Fácil uso.

1.- Ajuste la correa alrededor de su barbilla.

2.- Coloque el velcro en la parte superior de la cabeza.

3.- Asegúrese que los orificios del costado de la correa rodeen sus orejas.

BENEFICIOS



Ventilación

U

Universal



Levanta barbilla



Confortable



Compresión sin molestias

Talla: Universal, ajustable a la mayoría de los rostros.

CONOCE MÁS



ZONA SUPERIOR



SOPORTE PARA HOMBRO PREMIUM

Talla: Universal, para hombro izquierdo o derecho. Se ajusta a la mayoría de los brazos y hombros.

 **alta calidad**



- Ajuste adicional al hombro
- Mantiene al hombro caliente
- Cómodo y fácil de ponerse

INMOVILIZADOR DE HOMBRO

Talla: Universal.



- Material cómodo
- Para hombro izquierdo o derecho
- Ideal para post cirugía



SOPORTE PARA CLAVÍCULA

Talla: Universal.



- Material de espuma/terciopelo
- Fácil ajuste
- Anillos ajustables



ZONA INFERIOR FÉRULAS

EQUICENTER
EQUIPO MÉDICO



FÉRULA PARA MUÑECA

Talla: Chica y Mediana **Lado:** Izquierdo y Derecho



FÉRULA PARA MUÑECA AMBIDIESTRA

Talla: Universal, ajustable - Izquierdo o Derecho



FÉRULA PARA MUÑECA
CON PULGAR EN ABDUCCIÓN

Talla: Universal, ajustable
Izquierdo o Derecho



FÉRULA PARA PULGAR
LARGA

Talla: Universal, ajustable
Izquierdo o Derecho



FÉRULA PARA PULGAR
CORTA

Talla: Universal, ajustable
Izquierdo o Derecho



Estabiliza y
alivia el dolor



Ligera y duradera



Transpirable



Elástica

BENEFICIOS

ZONA INFERIOR SOPORTES Y MUÑEQUERAS



SOPORTE PARA CODO DE TENISTA

Talla: Universal, se ajusta a la mayoría de tamaños.



SOPORTE PARA CODO DE TENISTA CON GEL

Talla: Universal.



MUÑEQUERA ELÁSTICA EN BANDA

Talla: Universal, se ajusta a la mayoría de tamaños.



CORREA PARA MUÑECA DE NEOPRENO

Talla: Universal, se ajusta a la mayoría de tamaños.

BENEFICIOS



ZONA INFERIOR

CODERAS



CODERA AJUSTABLE

Talla: Universal, se ajusta a la mayoría de tamaños.



CODERA ELÁSTICA DEPORTIVA PREMIUM

Talla: Chica, mediana y grande.

 **alta calidad**



CODERA ELÁSTICA CON COJÍN DE GEL Y CORREA DE AJUSTE

Talla: Chica, mediana y grande.




BENEFICIOS



MULETAS

¡Recupera tu paso con nosotros! Caminemos juntos hacia la rehabilitación.

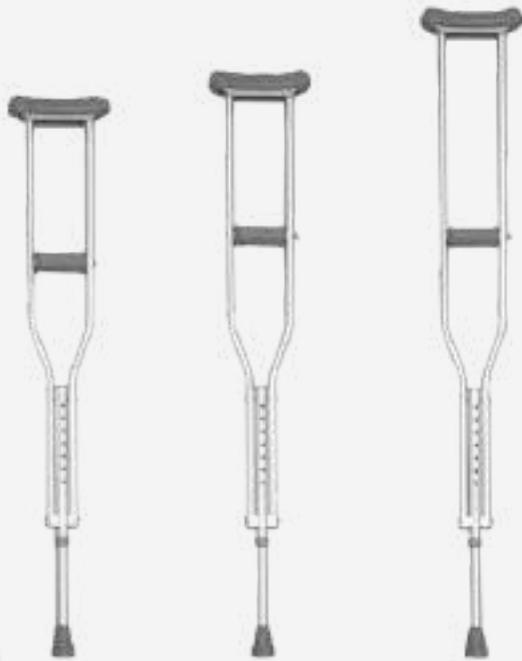

Disponibles en varios tamaños
MULETAS DE ALUMINIO



- Material de aluminio resistente.
- Altura ajustable a tamaño.
- Axilar y brazal acolchonado.
- Capacidad máxima de carga: 110 kg.

- Fabricado en aluminio anodizado.
- Altura ajustable.
- Puño ergonómico.
- Regatones antiderrapantes.


Peso máximo de usuario: 100 kg.



MULETAS TIPO CANADIENSES

BASTONES

"Apoyo confiable, movilidad imparable: elige calidad, elige nuestros bastones médicos."

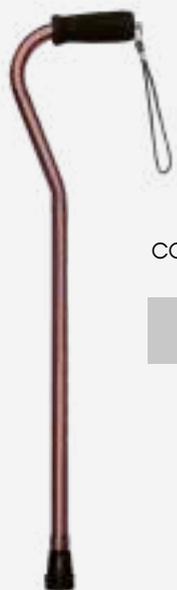

COLORES DISPONIBLES :



BASTÓN CUELLO DE GANSO



BASTÓN CON ASIENTO



BASTÓN CUATRO APOYOS



BASTÓN CURVO



BASTÓN ALEMÁN



BASTÓN 4 APOYOS DOBLE APOYO UK

ANDADERAS

Movilidad con estilo, confort sin igual.



COLORES DISPONIBLES :



ANDADERA ROLLATOR E-10257BL-2 ACE CON CANASTILLA

- Frenos de chicote y sistema de fijado.
- Manubrios de altura ajustable.
- Asiento de vinil acojinado.
- Respaldo acojinado, abatible.
- Canastilla porta objetos, desmontable.
- Sistema de plegado.
- Ruedas de 7".
- Soporta 110 kg.



ANDADERA ROLLATOR E-10257BL-2 ACE CON CANASTILLA

- Acabado de lujo en aluminio, diámetro de tubulares de 1 pulgada.
- Altura ajustable, con asiento y 2 llantas delanteras.
- Regatón anti-derrapante de hule de alta duración.
- Plegado fácil, con asiento amplio y acojinado.



ANDADERA CON RUEDAS DE 5"

- Acabado de lujo en Aluminio, diámetro de tubulares de 1 pulgada color gris.
- Altura ajustable de 8 alturas, botón para plegar con una mano, plegable frontal.
- Llantas delanteras de 5 pulgadas con rin de policarbonato.
- Regatón anti-derrapante de hule de alta duración.
- Peso: 2.5 kg.
- Ancho: 51 cm.



ANDADERA BÁSICA

- Estructura de acero esmaltado en color rojo o azul.
- Frenos de chicote y sistema de fijado.
- Manubrios de altura ajustable.
- Asiento de vinil acojinado.
- Respaldo acojinado, abatible.
- Canastilla porta objetos, desmontable.
- Sistema de plegado.
- Ruedas de 7".
- Soporta 110 kg.

CONTACTO



SUCURSALES
MORVI



@grupomorvi



Grupomedicomorvi.com



@equicenteremi



Equicenterem.com

MORELIA

Carpinteros de Paracho 230. Col.
Vasco de Quiroga, C.P. 58230
(443) 315 95 25

URIANGATO

Blvd. José Morelos 113, Col. Centro
(445) 109 52 50

URUAPAN

Camelia No. 40, Col. La Mora,
C.P. 60130
(452) 306 99 86

QUERÉTARO

Av. Paseo de las Pitayas 40
int. 31 C, Thandi C.P. 76269
(443) 358 61 12